

PCR検査 検体の取扱い -生唾液容器での提出-

【容器】



提出用容器

- 検査材料: 生唾液
- 保管方法: 指定の梱包セットによる三重梱包
- 保存温度: 採取後要冷蔵
- 保存期間: **採取後1日**

※ 採取後は速やかにご提出ください

【唾液生検体採取方法】

- ① 依頼書に貼付されている検体ラベルに被検者名を記入し提出用容器に貼付してください。
又、検体に貼られたバーコードを読み取りますので必ず貼付して下さい。
- ② 口腔内に唾液を貯め提出容器に2ml程度入れて下さい。
注) 検体採取前(10分程度)の飲食・うがい・ガムを噛む等は検査結果に影響を及ぼしますので絶対にお止め下さい。
- ③ 提出用容器はしっかりと蓋を閉め吸水パックに入れてからバリアパウチに封入、その後バリアボックスに入れてご提出ください。
※ 三重梱包1セットに3検体まで梱包可能